

Störungen am EasyPull

Beim Auftreten von Problemen oder Störungen am EasyPull lesen Sie das Kapitel „Störungen und Störungsbeseitigung“ in der Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich eine Störung durch die dort genannten Hinweise nicht beheben lässt.

Kundendienst

Der Kundendienst der AMF-Brunns GmbH & Co. KG steht Ihnen bei der Bestellung von Ersatzteilen, bei Problemen, Fragen und für Wartungs- und Reparaturarbeiten zur Verfügung:

Anschrift: AMF-Brunns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101
26689 Apen

Telefon: +49 (0) 44 89 / 72 72-22

Telefax: +49 (0) 44 89 / 62 45

E-Mail: service.hubmatik@amf-brunns.de

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!



AMF-Brunns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 | 26689 Apen | Germany
Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 22
Telefax +49 (0) 44 89 / 6245
service.hubmatik@amf-brunns.de
www.amf-brunns.de

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG



**KURZ-
BEDIENUNGS-
ANLEITUNG**
vor Gebrauch
sorgfältig lesen,
griffbereit im
Fahrzeug
mitführen!






i Hinweis: Wenn Sie den EasyPull mit einem anderen als dem zuletzt transportierten Rollstuhl benutzen wollen, muss der EasyPull anhand der Bedienungsanleitung neu eingestellt werden.

! Warnung! Der besetzte oder unbesetzte Rollstuhl kann unkontrollierte Bewegungen ausführen, wenn er vom EasyPull in das Fahrzeug gezogen wird. Führen Sie einen Passagier im Rollstuhl oder einen unbesetzten Rollstuhl von Hand bis zum Erreichen der vorgesehenen Position.

Aufnehmen eines Passagiers / eines Rollstuhls

1. Klappen Sie die vorhandene Auffahrrampe aus.
2. Begleiten Sie den Passagier oder schieben Sie den unbesetzten Rollstuhl vor die Auffahrrampe.
3. Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
4. Nehmen Sie die Gurte des EasyPull zur Hand.
5. Drücken und halten Sie an der Fernbedienung Taste „A“ für langsames Abrollen oder Taste „C“ für schnelles Abrollen der Gurte.

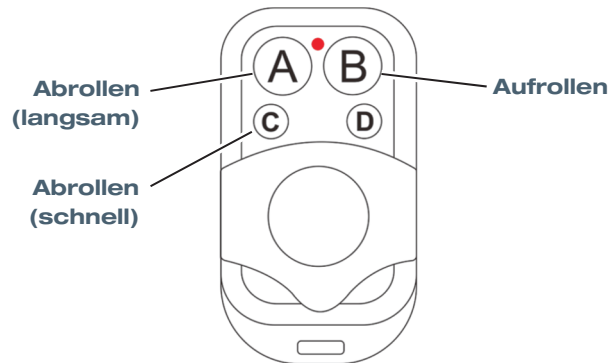

Ein Piepton erklingt.

6. Ziehen Sie die Gurte des EasyPull bis zum Rollstuhl heraus.
7. Lassen Sie die Taste los.

Der Piepton verstummt.

8. Befestigen Sie die Gurte an den vorderen Kraftknoten-adaptoren des Rollstuhls. Verwenden Sie die Gurtschlaufen, wenn keine Kraftknotenadapter vorhanden sind.



9. Lösen Sie Bremsen des Rollstuhls.
10. Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl und halten Sie ihn an den Griffen fest.
11. Drücken und halten Sie Taste „B“ der Fernbedienung.
Ein Intervall-Piepton erklingt.
12. Führen Sie den Rollstuhl, während er in das Fahrzeugheck hineingezogen wird.

Wenn der Rollstuhl seine vorgesehene Position im Fahrzeug erreicht hat, hält der EasyPull an und die Winde verriegelt.
Ein Dauer-Piepton erklingt.

13. Lassen Sie Taste „B“ los.

Der Piepton verstummt.

14. Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
15. Sichern Sie den Rollstuhl von hinten mit den vorhandenen Gurten.

i Hinweis: Wenn der EasyPull nicht angehalten und verriegelt hat oder der Rollstuhl nicht mit den hinteren Gurten gesichert werden kann, muss der EasyPull anhand der Bedienungsanleitung eingestellt werden.

16. Schnallen Sie den Passagier an.
17. Klappen Sie die Auffahrrampe ein.
18. Schließen Sie die Hecktüren / die Heckklappe.

Ausstieg eines Passagiers / Ausladen eines Rollstuhls

1. Klappen Sie die Auffahrrampe aus.
2. Lösen Sie die Gurte, mit denen der Passagier angeschnallt ist.
3. Lösen und entfernen Sie die hinteren Gurte am Rollstuhl.
4. Lösen Sie die Bremsen des Rollstuhls.
5. Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl und halten Sie ihn an den Griffen fest.
6. Drücken und halten Sie Taste „A“ oder „C“ der Fernbedienung.

Ein Piepton erklingt.

7. Ziehen Sie den Passagier / den Rollstuhl aus dem Fahrzeug heraus.
8. Bleiben Sie hinter dem Rollstuhl, bis er die Rampe vollständig verlassen hat.
9. Lassen Sie die Taste los.

Der Piepton verstummt.

10. Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
11. Lösen Sie die Gurte vom Rollstuhl.
12. Halten Sie die Gurte hoch.
13. Drücken und halten Sie Taste „B“ der Fernbedienung.

Ein Intervall-Piepton erklingt.

Der EasyPull zieht die Gurte in das Fahrzeug.

14. Halten und führen Sie die Gurte, während sie eingezogen werden.

Die Winde hält an und verriegelt, sobald sich mindestens ein Magnet am Windengehäuse befindet.

Ein Dauer-Piepton erklingt.

15. Lassen Sie Taste „B“ los.

Der Piepton verstummt.

16. Klappen Sie die Auffahrrampe ein.
17. Schließen Sie die Hecktüren / die Heckklappe.