

5. Einstieg eines Passagiers

Wenn kein Passagier einsteigen soll: Weiter bei **Punkt 6**.

- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Senken“, bis die Plattform am Fahrzeugboden aufliegt.
- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungsklappe durch Betätigen des Trehebels herunter.
- ⇒ Lösen Sie die Feststellbremse des Rollstuhls und schalten Sie einen Elektrorollstuhl ein.
- ⇒ Begleiten Sie den Passagier von der Plattform in das Fahrzeug.
- ⇒ Sichern Sie den Passagier und den Rollstuhl mit den dafür vorgesehenen Sicherungs- und Rückhaltesystemen.
- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungsklappe hoch.
- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Heben“, bis die Plattform die obere Endposition erreicht hat.

6. Schwenklift in die Fahrposition bringen

- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungsklappe durch Betätigen des Trehebels herunter.
- ⇒ Klappen Sie das Seitenschutzgeländer herunter.
- ⇒ Klappen Sie die Plattform hoch, bis sie einrastet.
- ⇒ Lösen Sie die Arretierung der Hauptschwenksäule mit dem Entriegelungshebel.
- ⇒ Schwenken Sie den Lift in das Fahrzeug, bis er einrastet.
- ⇒ Drücken Sie den Hebel des Arretier-Spanners bis zum Anschlag nach unten.
- ⇒ Schalten Sie den Lift mit dem Hauptschalter aus.

7. Notbetrieb

Heben:

- ⇒ Bewegen Sie den Bedienhebel der Handpumpe vor und zurück, bis die Plattform die gewünschte Position erreicht hat.

Senken:

- ⇒ Schrauben Sie den Bedienhebel der Handpumpe ab.
- ⇒ Demontieren Sie die Verkleidung.
- ⇒ Drücken Sie das Notsenkventil herunter und drehen Sie es langsam gegen den Uhrzeigersinn.
- ⇒ Drücken Sie das Notsenkventil herunter und drehen Sie es bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn, wenn die Plattform die gewünschte Position erreicht hat.

Störungen am Schwenklift

Beim Auftreten von Problemen oder Störungen lesen Sie das Kapitel „Störungen und Störungsbeseitigung“ in der regulären Bedienungsanleitung. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn sich eine Störung durch die dort genannten Hinweise nicht beheben lässt.

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!

Technische Änderungen vorbehalten.



AMF-Bruns GmbH & Co. KG
Hauptstraße | 26689 Apen | Germany
Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 22
Telefax +49 (0) 4489 / 62 45
service.hubmatik@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de

Art.-Nr.: 10022415 rev. 2 | 11/2021

SCHWENKLIFT BSL 350




Diese Kurzbedienungsanleitung griffbereit im Fahrzeug mitführen!

Vor Gebrauch auch die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen!



www.amf-bruns.de

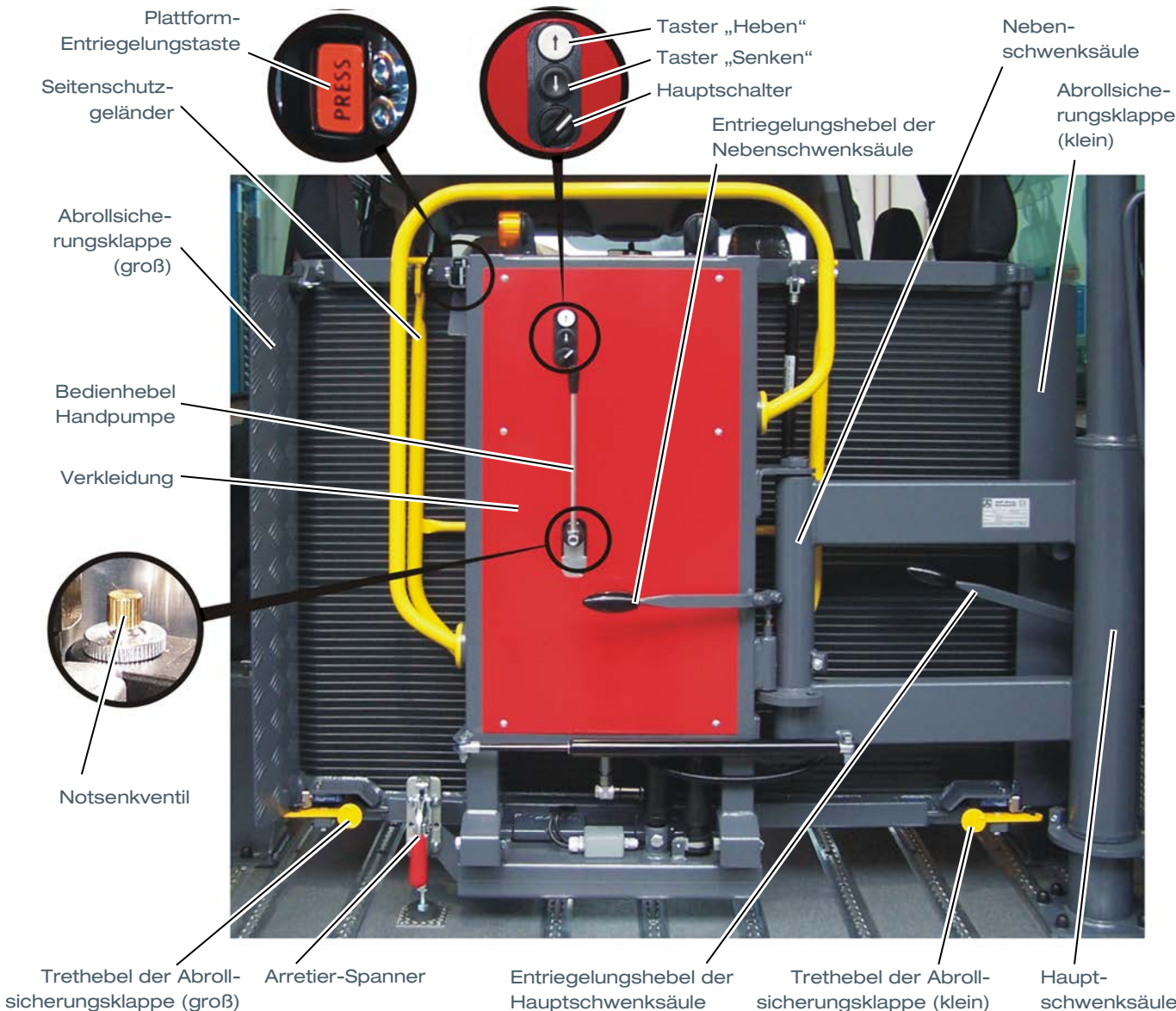

1. Ausschwenken in die 90°-Position

- ⇒ Schalten Sie den Lift mit dem Hauptschalter ein.
- ⇒ Lösen Sie den Arretier-Spanner.
- ⇒ Lösen Sie die Arretierung der Hauptschwenksäule mit dem Entriegelungshebel.
- ⇒ Schwenken Sie den Lift um 90° aus dem Fahrzeug heraus, bis er einrastet.
- ⇒ Drücken Sie die Plattform-Entriegelungstaste.
- ⇒ Klappen Sie die Plattform herunter.
- ⇒ Klappen Sie das Seitenschutzgeländer hoch.
- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungs-klappe hoch.

2. Ausstieg eines Passagiers

Wenn kein Passagier aussteigen soll: Weiter bei **Punkt 3.**

- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Senken“, bis die Plattform am Fahrzeugboden aufliegt.
- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungs-klappe durch Betätigen des Trethebels herunter.
- ⇒ Lösen Sie die Sicherungs- und Rückhaltesysteme des Passagiers und des Rollstuhls.
- ⇒ Begleiten Sie den Passagier auf die Plattform.
- ⇒ Betätigen Sie die Feststellbremse des Rollstuhls und schalten Sie einen Elektrorollstuhl aus.
- ⇒ Klappen Sie die kleine Abrollsicherungs-klappe hoch.
- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Heben“, bis die Plattform die obere Endposition erreicht hat.

3. Senken der Plattform

- ⇒ Lösen Sie die Arretierung der Nebenschwenksäule mit dem Entriegelungshebel.
- ⇒ Schwenken Sie den Lift um weitere 90° aus dem Fahrzeug heraus, bis er einrastet.
- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Senken“, bis die Plattform am Boden aufliegt.
- ⇒ Klappen Sie die große Abrollsicherungs-klappe durch Betätigen des Trethebels herunter.
- ⇒ Lösen Sie die Feststellbremse des Rollstuhls und schalten Sie einen Elektrorollstuhl ein.
- ⇒ Begleiten Sie den Passagier von der Plattform herunter.

4. Heben der Plattform

- ⇒ Begleiten Sie den Passagier auf die Plattform.
- ⇒ Betätigen Sie die Feststellbremse des Rollstuhls und schalten Sie einen Elektrorollstuhl aus.
- ⇒ Klappen Sie die große Abrollsicherungs-klappe hoch.
- ⇒ Drücken und halten Sie den Taster „Heben“, bis die Plattform die obere Endposition erreicht hat.
- ⇒ Lösen Sie die Arretierung der Nebenschwenksäule mit dem Entriegelungshebel.
- ⇒ Schwenken Sie den Lift um 90° in das Fahrzeug hinein, bis er einrastet.

⚠ Warnung! Die Füße des Bedieners dürfen sich beim Senken nicht unter der Plattform befinden!

⚠ Warnung! Das Heben und Senken der Plattform ist nur zulässig, wenn beide Abrollsicherungs-klappen hochgeklappt sind!

⚠ Vorsicht! Hub-, Senk- und Schwenkbewegungen sind nur bei ausgeschaltetem Elektrorollstuhl und / oder Betätigung der Feststellbremse zulässig!

⚠ Warnung! Benutzen Sie den Notbetrieb nur, um eine Notsituation für den Passagier zu verhindern!

