


Die optimale Sitzposition

- 1 Die Oberkante der Kopfstütze liegt in Höhe des Scheitels des Passagiers.
- 2 Der Abstand zwischen Kopf und Kopfstütze ist möglichst gering.
- 3 Die Oberkante der Rückenlehne liegt in Höhe des Schulterbereichs.
- 4 Der Rücken liegt an der Rückenlehne an.

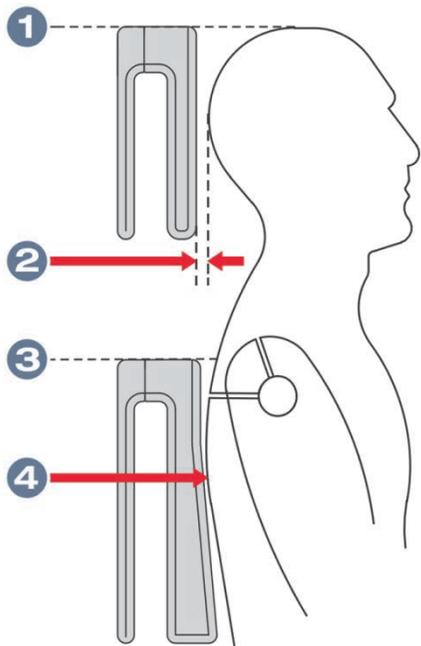

Hinweis:

Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, sind nicht immer in der Lage, eine Haltung einzunehmen, wie sie in der Abbildung oben dargestellt ist.

Versuchen Sie immer, die Bedürfnisse des Passagiers an den Komfort zu berücksichtigen und trotzdem ein Maximum an Sicherheit zu erreichen.

Die Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!



**AMF-Brunns GmbH & Co. KG**  
 Hauptstraße | 26689 Apen | Germany  
 Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 30  
 Telefax +49 (0) 44 89 / 62 45  
 service.hubmatik@amf-bruns.de  
 www.amf-bruns.de

Art.-Nr.: 10019424 | 06/2017

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG





**Schwenkarme drehen**


1. Drücken Sie den Bedienhebel am Schwenkarm nach oben. Der Schwenkarm wird dadurch angehoben, und die Arretierung wird geöffnet.



2. Drehen Sie den Schwenkarm um 90° oder 180° in die gewünschte Richtung.
3. Lassen Sie den Bedienhebel los. Der Schwenkarm sinkt wieder nach unten und die Arretierung rastet wieder ein.

**Schwenkarme ausziehen und einschieben**

Die Schwenkarme lassen sich ohne weitere Vorbereitung ausziehen und einschieben. Sie werden von einer spürbar wirkenden Rasterung in ihrer Position gehalten.

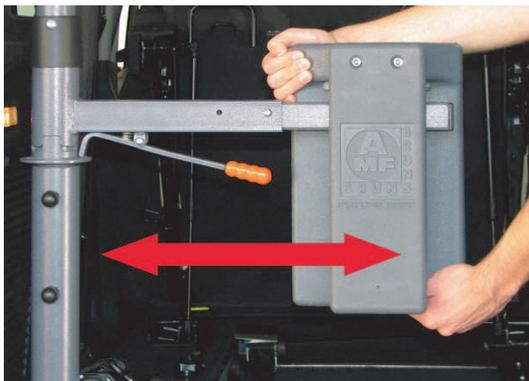

**Höhenverstellung von Kopfstütze und Rückenlehne**

1. Drücken Sie an der Kopfstütze oder Rückenlehne den Arretierknopf.



2. Schieben Sie die Kopfstütze oder Rückenlehne in die gewünschte Höhe.
3. Lassen Sie den Arretierknopf los.

**Hinweis:**

Die Vorderseite der Rückenlehne besitzt ein diagonales Profil. Durch dieses Profil können Sie die Höhenverstellung auch für eine Feineinstellung der Rückenlehne nach vorn oder hinten nutzen.


**⚠Achtung!**

Für den sicheren Betrieb des FutureSafe müssen die Rückhaltesysteme für den Rollstuhl und den Passagier nach den vor Ort geltenden Normen ausgeführt sein. Wenden Sie sich an die AMF-Brunns GmbH, wenn Zweifel bestehen, ob die Rückhaltesysteme in Ihrem Fahrzeug korrekt ausgeführt sind.



**FutureSafe mit Seitenhalterung vor- und zurückschieben**

1. Drehen Sie die roten Verschlusshebel an beiden Smartfloorprofilen der Seitenhalterung in die senkrechte Position.
2. Lösen Sie an beiden Smartfloorprofilen die schwarzen Sternschrauben.
3. Verschieben Sie den FutureSafe nach vorn oder hinten in die gewünschte Position.

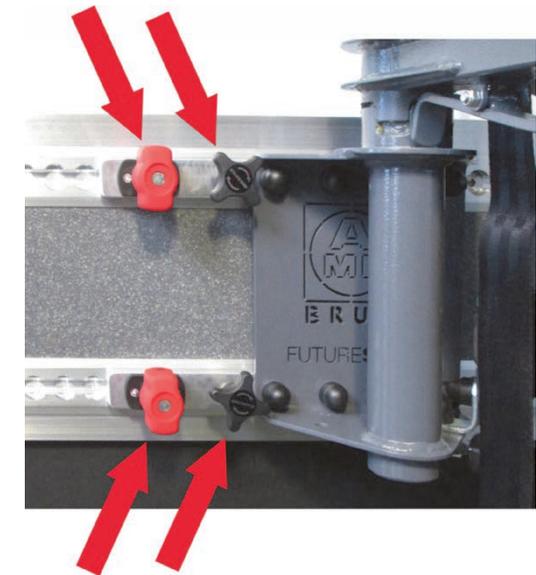

4. Stellen Sie die roten Verschlusshebel wieder in die waagerechte Position.
5. Lassen Sie den FutureSafe durch leichtes Vor- und Zurückschieben in den Smartfloorprofilen einrasten.
6. Ziehen Sie die schwarzen Sternschrauben wieder fest.

**⚠Warnung!**

Die Kopf- und Rückenstütze FutureSafe bietet nur dann Sicherheit, wenn der Passagier angeschnallt und der Rollstuhl im Fahrzeug gesichert ist.

Sichern Sie den Rollstuhl im Fahrzeug mit den vorhandenen Sicherungssystemen. Schnallen Sie den Passagier mit dem Schulterstraggurt und dem Beckengurt an.

Legen Sie den Beckengurt nicht über die Armlehnen des Rollstuhls. Der Beckengurt muss am Becken des Passagiers anliegen. Wenn er am Bauch des Passagiers anliegt, sitzt er zu hoch.