


Kassettenlift K70 / K90 / K90 ACTIVE

- ⇒ K70: Ziehen Sie das Wechselrelais ab.

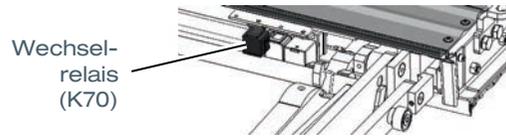


- ⇒ K90: Schieben Sie die Plattform mit der Hand vollständig in die Kassette ein, bis die Verriegelung einrastet.
- ⇒ K70: Ziehen Sie nach dem ersten Einrasten der Plattform in die Kassette hinein. Schieben Sie erst dann die Plattform vollständig in die Kassette hinein.



- ⇒ Sichern Sie die Plattform mit Draht oder anderen geeigneten Materialien gegen Herausrutschen, wenn die Plattform nicht ordnungsgemäß verriegelt.

Plattform einfahren im Notbetrieb (K90 ACTIVE)

- ⇒ Senken Sie die Plattform vollständig ab.
- ⇒ Drücken Sie das Überrollblech nach unten.
- ⇒ Entfernen Sie die Relaisabdeckung.
- ⇒ Ziehen Sie eines der beiden Wechselrelais ab.

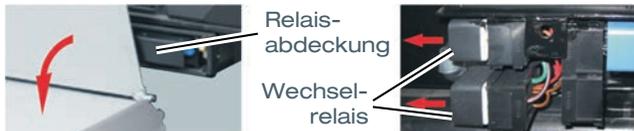

- ⇒ Fahren Sie die Plattform in die Höhe der Kassette.
- ⇒ Entfernen Sie den Stopfen an der linken Seite der Kassette.
- ⇒ Führen Sie den Handpumpenhebel oder einen anderen geeigneten Gegenstand gerade in die Öffnung ein. Drücken Sie kräftig, um die Plattform zu entriegeln.



- ⇒ Schieben Sie die Plattform mit der Hand etwa 2 cm in die Kassette ein.
- ⇒ Nehmen Sie den Gegenstand aus der Öffnung.
- ⇒ Schieben Sie die Plattform vollständig in die Kassette.
- ⇒ Sichern Sie die Plattform mit Draht oder anderen geeigneten Materialien gegen Herausrutschen, wenn die Plattform nicht ordnungsgemäß verriegelt.
- ⇒ Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

Stand: Oktober 2018 / Technische Änderungen vorbehalten.

AMF-Brunns

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Kassettenlift K70 / K90 / K90 ACTIVE



Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!

KURZ-BEDIENUNGS-ANLEITUNG
vor Gebrauch sorgfältig lesen, griffbereit im Fahrzeug mitführen!



AMF-Brunns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 | 26689 Apen | Germany
Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 30
Telefax +49 (0) 44 89 / 6245
service.hubmatik@amf-brunns.de
www.amf-brunns.de

Art.-Nr.: 10022338 | 10/2018



www.amf-brunns.de



⚠️ Warnung! Die Füße des Bedieners dürfen sich beim Senken nicht unter der Plattform befinden!

⚠️ Achtung! Vor dem Absenken in die Einfahrstellung muss sich die Plattform in ihrer höchsten Position befinden!

⚠️ Achtung! Das Befahren der Plattform mit einem Elektrorollstuhl ist nur mit ausgeschaltetem Motor zulässig!

1. Bedienelemente

Die Bedienung des Kassettenliftes erfolgt mittels Kabel-Fernbedienung, optional lieferbarer Bluetooth-Fernbedienung oder Smartphone mit installierter Fernbedienungs-APP (siehe reguläre Bedienungsanleitung).



2. Auffahrrichtung

K70 und K90:

K90 ACTIVE:



3. Einstiegsvorgang

- ⇒ Fahren Sie die Plattform vollständig aus der Kasette heraus.
- ⇒ Senken Sie die Plattform bis auf den Boden ab.
- ⇒ Schalten Sie den Motor eines Elektrorollstuhls aus.
- ⇒ Fahren Sie den Rollstuhl mittig auf die Plattform.
- ⇒ Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
- ⇒ Heben Sie die Plattform bis auf die Höhe des Fahrzeugbodens an.

- ⇒ Lösen Sie die Bremsen des Rollstuhls.
- ⇒ Fahren Sie den Rollstuhl in das Fahrzeug.
- ⇒ Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
- ⇒ Senken Sie die Plattform in die Einfahrstellung ab.
- ⇒ Fahren Sie die Plattform vollständig in die Kasette ein.

4. Ausstiegsvorgang

- ⇒ Fahren Sie die Plattform vollständig aus der Kasette heraus.
- ⇒ Heben Sie die Plattform bis auf die Höhe des Fahrzeugbodens an.
- ⇒ Lösen Sie die Bremsen des Rollstuhls.
- ⇒ Fahren Sie den Rollstuhl mittig auf die Plattform.
- ⇒ Stellen Sie die Bremsen des Rollstuhls fest.
- ⇒ Senken Sie die Plattform bis auf den Boden ab.
- ⇒ Lösen Sie die Bremsen des Rollstuhls.
- ⇒ Fahren Sie den Rollstuhl von der Plattform.
- ⇒ Heben Sie die Plattform vollständig an.
- ⇒ Senken Sie die Plattform in die Einfahrstellung ab.
- ⇒ Fahren Sie die Plattform vollständig in die Kasette ein.

5. Notbetrieb

⚠️ Warnung! Benutzen Sie den Notbetrieb nur, um eine Notsituation für den Passagier zu verhindern! Das Ausführen des Notbetriebs ist nur mit zwei Personen möglich! Leiten Sie so schnell wie möglich die Instandsetzung ein.

Notheben

Die optionale Handpumpe befindet sich auf der linken Seite der Kasette.



- ⇒ Stecken Sie den Pumpenhebel in die Handpumpe.
- ⇒ Pumpen Sie solange mit dem Pumpenhebel auf und ab, bis die gewünschte Höhe erreicht ist.
- ⇒ Entfernen Sie den Hebel aus der Handpumpe.

Notsenken

Das Notsenkventil ist ein Kugelhahn. Dieser befindet sich beim K90 hinter dem Hydraulikaggregat und ist von der Seite zu erreichen, die der Plattform gegenüber liegt. Beim K90 ACTIVE befindet sich der Kugelhahn direkt neben der Handpumpe.



- ⇒ Öffnen Sie den Kugelhahn durch Drehen des Hebels.
- ⇒ Schließen Sie den Kugelhahn, sobald sich die Plattform auf das gewünschte Niveau abgesenkt hat.



Plattform ausfahren im Notbetrieb (K70 / K90)

- ⇒ Nehmen Sie den mitgelieferten Haken zur Hand.
- ⇒ Entfernen Sie den Gummistopfen auf der Rückseite der Kasette: Drücken Sie den Haken mit dem geraden Ende kräftig in den Stopfen und hebeln Sie ihn aus.
- ⇒ Führen Sie das gebogene Hakenende in die Öffnung ein.
- ⇒ Ziehen Sie mit dem Haken kräftig an dem Seil, das hinter der Öffnung sichtbar ist.



- ⇒ Betätigen Sie die Funktion „Plattform ausfahren“ an der Fernbedienung. Falls keine Funktion eintritt, ziehen Sie die Plattform von Hand heraus.
- ⇒ Stoppen Sie nach 10 bis 15 cm.
- ⇒ Entfernen Sie den Haken aus der Öffnung.
- ⇒ Fahren Sie die Plattform vollständig heraus.
- ⇒ Setzen Sie den Stopfen wieder ein.

Plattform einfahren im Notbetrieb (K70 / K90)

- ⇒ Fahren Sie die Plattform in die Höhe der Kasette.
- ⇒ Drücken Sie das Überrollblech nach unten.
- ⇒ K90: Ziehen Sie eines der beiden Wechselrelais ab.

