

Nutzung des Fahrzeugs ohne Passagier

Nach dem Ausstieg eines Passagiers / dem Ausladen eines Rollstuhls:

1. Klappen Sie die Auffahrrampe hoch, bis sie in der senkrechten Position hörbar einrastet.
2. Bei Easy-Flex-Rampe: Drücken Sie den Bedienhebel für das Umklappen nach rechts.



3. Klappen Sie die Auffahrrampe vollständig nach innen, bis ihre Anschläge auf dem Fahrzeugboden seitlich der Bodenwanne aufliegen.

⚠ Achtung! Belasten Sie die Auffahrrampe rollstuhlseitig mit höchstens 300 kg. Belasten Sie die vollständig eingeklappte Auffahrrampe mit höchstens 100 kg.

Ausbau der Sitzhaltebügel

Um Sicherheit und eine bequeme Fußfreiheit für den Passagier im Rollstuhl zu gewährleisten, müssen bei Fahrzeugen mit langem Radstand die Sitzhaltebügel herausgenommen werden.



1. Heben Sie das Sicherungsblech eines Sitzhalters an.
2. Schieben Sie den Sitzhalter nach hinten.
3. Nehmen Sie den Sitzhalter ab.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für den zweiten Sitzhalter.

KURZBEDIENUNGSANLEITUNG

Opel Vivaro / Renault Trafic / Fiat Talento mit Easy- und Easy-Flex-Rampe



KURZ-BEDIENUNGS-ANLEITUNG
vor Gebrauch sorgfältig lesen, griffbereit im Fahrzeug mitführen!

Diese Kurzbedienungsanleitung ersetzt keinesfalls die reguläre Bedienungsanleitung! Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Produktes sorgfältig die Bedienungsanleitung durch!



AMF-Bruns GmbH & Co. KG
Hauptstraße 101 | 26689 Apen | Germany
Telefon +49 (0) 4489 / 72 72 30
Telefax +49 (0) 4489 / 62 45
service.hubmatik@amf-bruns.de
www.amf-bruns.de





Ausklappen der Auffahrrampe

1. Bei Easy-Flex-Rampe: Klappen Sie die Auffahrrampe nach oben in die senkrechte Position, bis sie hörbar einrastet.



2. Drücken Sie den Bedienehebel für das Ausklappen nach links.



3. Klappen Sie die Auffahrrampe aus.




- ⚠️ Vorsicht! Halten Sie die Auffahrrampe fest, bis sie vollständig am Boden aufliegt. Lassen Sie die Auffahrrampe langsam ausklappen.**

Bei Fahrzeugen mit langem Radstand:

1. Klappen Sie die dritte Sitzreihe hoch.
2. Bauen Sie, wenn nötig, die dritte Sitzreihe aus.
3. Nehmen Sie die Sitzhalterungen heraus (siehe umseitige Abbildung).

Aufnehmen eines Passagiers / eines Rollstuhls

1. Begleiten Sie den Rollstuhl vor die Auffahrrampe.
2. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.

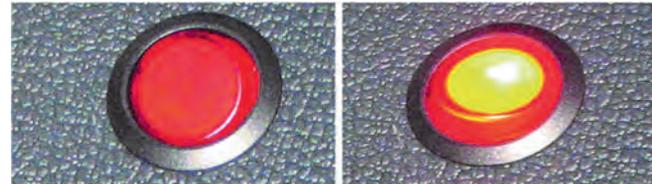

3. Ziehen Sie die Elektrogurte bis zum Rollstuhl heraus.
4. Befestigen Sie die Elektrogurte am Rollstuhl.



5. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter erlischt.

- ⚠️ Warnung! Der Rollstuhl kann unkontrolliert zurückrollen, wenn die Kontrollleuchte im Kippschalter leuchtet. Der Passagier im Rollstuhl kann verletzt werden. Stellen Sie sicher, dass die Kontrollleuchte im Kippschalter nicht leuchtet. Schieben Sie erst dann den Rollstuhl die Auffahrrampe hinauf.**

6. Schieben Sie den Rollstuhl in das Fahrzeug.

Sicherung des Passagiers und des Rollstuhls im Fahrzeug

1. Hängen Sie die Retraktoren in die Fittings ein.
2. Schließen Sie die Retraktoren am Rollstuhl an.



3. Spannen Sie die Retraktoren durch Anziehen der Gurtrollen.
4. Stellen Sie die Feststellbremsen des Rollstuhls fest.
5. Sichern Sie den Passagier im Rollstuhl mit den vorhandenen Personenrückhaltesystemen.
6. Klappen Sie die Auffahrrampe hoch, bis sie hörbar einrastet.

Ausstieg eines Passagiers / Ausladen eines Rollstuhls

1. Klappen Sie die Auffahrrampe langsam aus.
2. Lösen Sie die Gurtrollen der Retraktoren.
3. Lösen Sie die Retraktoren von den Fittings.
4. Lösen Sie die Retraktoren vom Rollstuhl.
5. Lösen Sie die Feststellbremsen des Rollstuhls.

- ⚠️ Warnung! Der Rollstuhl kann unkontrolliert zurückrollen. Der Passagier im Rollstuhl kann verletzt werden. Stellen Sie sich hinter den Rollstuhl, um ihn gegen Zurückrollen zu sichern. Betätigen Sie erst dann den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.**

6. Betätigen Sie den Kippschalter, sodass die Kontrollleuchte im Kippschalter aufleuchtet.
7. Begleiten Sie den Rollstuhl von der Auffahrrampe.
8. Lösen Sie die Elektrogurte vom Rollstuhl.
9. Klappen Sie die Auffahrrampe hoch, bis sie hörbar einrastet.